

Anwendungsgebiete

Zur Vermeidung von Haarausfall bei Chemotherapie.

Gegenanzeigen

Das Tragen der Kühlkappe wird nicht empfohlen bei Kopfhautmetastasen oder nicht soliden Tumoren.

Produktbeschreibung

Die Elasto-Gel Hypothermie Kappe besteht aus einem glyzerinbasierten Hydrogel, das auch in gefrorenem Zustand flexibel bleibt. Das Obermaterial ist aus wasserfestem, dehnbarem Gewebe. Das Kinnband sorgt für festen Sitz der Kappe.

Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie die Kappe bei -18° bis -30° C in einer Plastiktüte für 12 Stunden in ein Tiefkühlfach.
2. Vor dem Anlegen der gekühlten Kappe sind folgende Vorbereitungen notwendig:
 - Befeuchten Sie die Haare des Patienten und bedecken Sie den Kopf anschließend mit einer Einweghaube (2 Folienhauben befinden sich im Lieferumfang). Dadurch wird die Temperaturübertragung verbessert und eine schnellere Abkühlung der Kopfhaut erreicht.
 - Schützen Sie exponierte Stellen wie Stirn und Ohren mit Verbandwatte oder ähnlichem vor Erfrierungen.
3. Sorgen Sie für einen möglichst engen Kontakt zwischen Kühlkappe und Kopfhaut.

Je nach Medikament wird folgende Tragedauer empfohlen:

- gemäß FEC-Protokoll

Kühlhaube bereits 15 Minuten vor der Injektion der Anthrazykline (50mg/m²) anziehen, Gesamtragedauer 1 Stunde.

- gemäß Taxol-Protokoll

Kühlkappe bereits 15 Minuten vor Therapiebeginn anziehen.
Bei einer Infusionsdauer von 3 Stunden sind 5 Kühlkappen notwendig
(Wechsel nach 45 min)

- gemäß Taxotere-Protokoll

Kühlkappe bereits 15 Minuten vor Therapiebeginn anziehen
Bei einer Infusionsdauer von 1 Stunde sind 2 Kühlkappen notwendig
(Wechsel nach 45 min)

4. Nehmen Sie die Kühlkappe frühestens 15 min nach Beendigung der Therapie wieder ab.

Wichtige Hinweise

Der Wechsel der Kühlkappe sollte so schnell wie möglich vonstatten gehen, um einen Vasodilatationsreflex zu vermeiden. Die Kühlkappe muss bei jeder Therapiesitzung getragen werden, da eine Unterbrechung ihre Wirkung beeinträchtigen könnte. Sorgen Sie stets für einen engen Kontakt zwischen Kappe und Kopfhaut; verwenden Sie zusätzliche Bandagen falls erforderlich.

Lassen Sie die Kühlkappe nach Gebrauch trocknen, bevor sie für den nächsten Einsatz wieder tiefgekühlt wird. Verwenden Sie zur Aufbewahrung den mitgelieferten Einsatz, damit die Kühlkappe ihre Form behält.

Reinigungshinweise

Wischen Sie die Kappe mit Seifenlauge oder Desinfektionsmittel ab, mit klarem Wasser nachwischen und abtrocknen. Tauchen Sie die Kappe niemals in Wasser.

Garantie

Elasto-Gel Hypothermie Produkte haben eine Garantiezeit von 6 Monaten beginnend mit dem Erwerbsdatum.

Vertrieb Deutschland

velo medizinprodukte gmbh Lohweg 17 D-92369 Sengenthal – Reichertshofen
Fon 09181/261412 Fax 09181/261413 velo@medizinprodukte.com www.velo-medizinprodukte.com



EU Authorized Representative:

M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW
United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050