



## HYPOTHERMIE FÜßLINGE

### Anwendungsgebiete

Vorbeugung gegen Onycholyse und Haut Toxizität aufgrund der Behandlung mit Docetaxel.

### Gegenanzeigen

- Raynaud-Syndrom
- distale Metastasen
- distale Arteriopathie
- Kälteüberempfindlichkeit

### Produktbeschreibung

Die Elasto-Gel Hypothermie Füßlinge bestehen aus einem Glycerin-basierten Hydrogel, das seine Weichheit / Geschmeidigkeit auch tiefgefroren behält. Das Obermaterial ist aus wasserfestem, dehnbarem Gewebe. Das Band am Fußgelenk sorgt dafür, dass der Füßling seine Position behält.

### Gebrauchsanweisung (\*)

1. Legen Sie die Füßlinge in einer Plastiktüte für mindestens 4 Stunden (12 Stunden bevorzugt) in ein Tiefkühlfach bei -18° bis -21° C. Die Füßlinge können bis zum Gebrauch unbegrenzt im Tiefkühlfach bleiben. Sie bleiben auch bei -30°C flexibel. Wenn der Kühlschrank abgetaut wird, nehmen Sie das Produkt bitte vorher heraus.
2. Bitte benutzen Sie aus hygienischen Gründen die Einweg-Vliessocken unter den Hypothermie Füßlingen.
3. Ziehen Sie die Füßlinge 15 min vor der Behandlung an und 15 min danach aus. Nach 45 min sollte das Paar Füßlinge gewechselt werden.

(\*) Dr. F. Scotté, et al., Journal of Clinical Oncology, 2004 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 22, N° 14S (July 15 Supplement), 2004: 8003

### Wichtige Hinweise

Der Wechsel der Füßlinge sollte so schnell wie möglich vonstatten gehen, um einen Vasodilatationsreflex zu vermeiden. Die Füßlinge müssen bei jeder Therapiesitzung getragen werden, da eine Unterbrechung ihre Wirkung beeinträchtigen könnte.

Lassen Sie die Füßlinge nach Gebrauch trocknen, bevor Sie für den nächsten Gebrauch wieder tiefgekühlt werden.

### Reinigungshinweise

Wischen Sie die Füßlinge mit Seife und Wasser ab, dann abspülen und trocknen. Tränken Sie die Füßlinge niemals in Wasser.

### Garantie

Elasto-Gel Hypothermie Füßlinge haben eine Garantiezeit von 6 Monaten beginnend mit dem Erwerbsdatum.

### Vertrieb Deutschland

velo medizinprodukte gmbh Lohweg 17 D-92369 Sengenthal – Reichertshofen  
Fon 09181/261412 Fax 09181/261413 [velo@medizinprodukte.com](mailto:velo@medizinprodukte.com) [www.velo-medizinprodukte.com](http://www.velo-medizinprodukte.com)



EU Authorized Representative: M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW – United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

Manufactured in the USA by: southwest technologies, inc. • 1746 Levee Road • North Kansas City, MO 64116 • Tel: +1 816 221 2442 • Fax: +1 816 221 3995